

Blodlansett - Safety Lancet Mini

för kapillärprovtagning



- Säker för användare och patient
- För engångsbruk
- Har ett integrerat stickskydd som hindrar användaren att sticka sig på använd produkt
- Enkel att använda – säkrad avfyrningsanordning eliminerar risken för oavsiktlig aktivering
- Enhandsfattning
- Greppvänlig – tre möjliga grepp
- Bra precision – har en liten anläggningsyta
- Har ett aktiveringsljud/klick
- Trippelslipad nål för att minska smärta
- CE0197
- Steril
- Nållansett

Bruksanvisning:



1. Vrid av skyddslocket genom att vrida $\frac{1}{4}$ varv
2. Tryck Safety Lancet fast mot den utvalda och rengjorda punktionsytan och tryck på avtrycksknappen (klick-ljud uppstår)
3. Kasta genast den använda lansetten i därför avsedd behållare

Tre valfria grepp:



Aktivering med tummen



Aktivering med pekfinger



Artikelnr:	Benämning:	Blodvolym:	Inner / Ytterfp:
85.1015	Blodlansett, stickdjup 1,6 mm, ljusblå, 28G	Liten < 50µl	200 / 1200



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50
Fax 042-19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com